

# ZeptAir

Przenośna Terapia  
Aerozolowa




## Przenośny nebulizator siatkowy

**ZeptAir** to **innowacyjne ultradźwiękowe rozwiązanie do nebulizacji siatkowej**, które zapewnia **skuteczną, przenośną i dostępną od ręki** terapię dla szybko rosnącej populacji zarówno **dzieci**, jak i **dorośli** cierpiących na **przewlekłe choroby układu oddechowego**, takie jak **astma, zapalenie oskrzeli, POChP i zapalenie płuc**.

Ten niezwykle wydajny system terapeutyczny charakteryzuje się wysoką szybkością nebulizacji i dostarcza do 0,9 ml leku na minutę, zapewniając krótkie i skuteczne leczenie aerozolowe. Szybka implementacja leku i ograniczenie zużycia leków.



Płuca

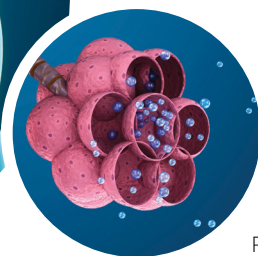

Pęcherzyki  
płucne

**ZeptAir Novel Micro Mesh Disc** wibruje z prędkością ultradźwiękową, wytwarzając nanocząsteczki aerozolu, które zamiast zatrzymywać się w górnych partiach układu oddechowego, natychmiast docierają do oskrzeli i w ten sposób **bezpośrednio wpływają na usunięcie przyczyny infekcji**.

# Ultra-efektywny system terapii aerozolowej



## Nowatorska technologia siatki

tworzy superdrobne, głęboko penetrujące cząsteczki aerozolu o MMAD (uśredniona wielkość cząsteczek aerozolu) mniejszym niż 5 mikrometrów, które wnika głęboko do płuc.



## Niski poziom hałasu

Szybko rozpyla cząsteczki, zapewniając ciche i komfortowe leczenie.



## Rozmiar dłoni

Waży zaledwie 108 gramów, umożliwia wygodne przenoszenie w dowolne miejsce i korzystanie w dowolnym czasie przy użyciu tylko jednej ręki.



## Zasilanie bateryjne

dla wygodnego leczenia, nawet w podróży.

## Cechy



- 1 Pokrywka
- 2 Pojemnik na lek
- 3 Dysza natryskowa
- 4 Przycisk zasilania
- 5 Zwiększenie szybkości nebulizacji
- 6 Zmniejszenie szybkości nebulizacji

- 7 Jednostka główna
- 8 Przycisk „Naciśnij”
- 9 Port ładowania USB
- 10 Ustnik
- 11 Maska

## Tryb pracy

Urządzenie posiada dwa tryby: **praca ciągła** i **na żądanie**.

Wybierz tryb „**Mikrofała**” poprzez naciśnięcie **przycisku zasilania** na 3 sekundy w celu automatycznej regulacji prędkości nebulizacji w zależności od częstości oddechów.

Tryb **na żądanie** umożliwia ręczną regulację. Przełączanie pomiędzy dwoma trybami odbywa się poprzez naciśnięcie **przycisku zasilania**. W celu dostosowania prędkości nebulizacji należy wybrać różne prędkości naciskając przyciski „+” lub „-”.

## Pojemnik na lek

**Wymienny i zdejmowany kubek** o pojemności **10 ml** roztworu płynnego. Może być stosowany do wszelkich płynnych roztworów (leków).

## Przycisk zasilania

**Terapia rozpoczyna się natychmiast** po naciśnięciu przycisku.

## Ustnik i maska

**Przenośny Nebulizator Zepter** może być używany przez wszystkie grupy wiekowe z **ustnikiem** lub **maską** dla maksymalnej wygody. Może być z łatwością używany przez dzieci, ponieważ mogą one nadal grać (w jakąś stacjonarną grę) lub czytać książki, podczas gdy rozpylony lek jest dostarczany do ich płuc.

## Ładowanie przez USB

**Czas ładowania** wynosi około **2 godziny**. Pełne naładowanie umożliwia 1 godzinę **ciągłego użytkowania**, co pozwala na wielokrotne dozowanie na jednym ładowaniu.

**Diody LED** sygnalizują niski poziom naładowania baterii.

## Oddychaj **Łatwo**, Oddychaj **Zdrowo**

Posiadanie **przenośnego, łatwego w użyciu** nebulizatora, który zapewnia ulgę na żądanie w **możliwie najkrótszym czasie**, znacząco poprawi jakość Twojego życia.

**Gdziekolwiek jesteś** – w szkole, w pracy, w samolocie, podczas spaceru lub po prostu w podróży, **Nebulizator ZeptAir Micro Mesh** pomoże Ci zachować zdrowie i poprawi Twój komfort.



To **małe i kompaktowe rozwiązanie** zapewnia **skuteczną terapię** dla całej rodziny, **w dowolnym miejscu i czasie**.

**ZeptAir** to idealne rozwiązanie dla **pacjentów w podeszłym wieku**, którzy mają trudności z używaniem tradycyjnych nebulizatorów.



# Przenośny Nebulizator Siatkowy Zepter w połączeniu z płynem **Hyperlight Fluid Fusion Subcellular Essential Complex**

W połączeniu z Hyperlight Fluid Fusion Subcellular Essential Complex, przenośny nebulizator siatkowy Zepter zapewnia terapię, która jest korzystna dla całego organizmu, a w szczególności dla układu oddechowego. Przy regularnym stosowaniu pomaga stworzyć silną odpowiedź immunologiczną i nieprzeniknioną barierę przed infekcjami patogenów, bakterii i wirusów.



Znajdź więcej informacji na temat opatentowanej technologii firmy Zepter: Hyperlight Subcellular Essential Complex





23 Sihleggstrasse  
8832 Wollerau  
Szwajcaria  
[zepter.pl](http://zepter.pl)